

HISTOCOLD


system uchování vzorků pro bezpečný transport histologického materiálu z
chirurgie do laboratoře patologie
(dle nařízení komise EU 605/2014)

PATENT PENDING



05-100100	HistoCold, uchovávací roztok, 10 litrů kanystr	1ks
05-100200	HistoCold dispenser, dávkovač roztoku	1ks
05-100300	Chladnička pro transport (65l)	1ks
05-100400	Vozík pro transport	1ks
05-SL200	UPS pro chladničku	1ks
05-100401	Kontejnerky 125ml	250ks
05-100402	Kontejnerky 250ml	200ks
05-100403	Kontejnerky 500ml	100ks
05-100404	Kontejnerky 1000ml	100ks
05-100405	Kontejnerky 3000ml	50ks
05-100406	Kontejnerky 5000ml	20ks

Použití:

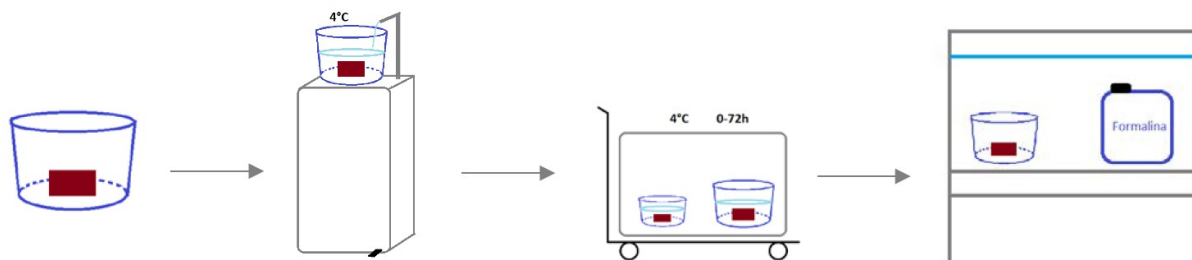

1. Vložte vzorek do prázdného kontejnerku.
2. Za pomoci dávkovače roztoku HistoCold napustíte médium do kontejnerku tak, aby pokrývalo celý vzorek. Uzávřete kontejner víkem.
3. Vzorky lze v médiu uchovat až **72h při teplotě 3-5°C**, dostatečně pro transport do laboratoře patologie.
4. V laboratoři patologie vyjměte vzorek z roztoku a postupujte dle běžné praxe přikrojení a fixace formalínem.

HistoCold roztok

Vzhled:	roztok světle modrý
Balení:	primární kanystr PE neutrální barvy, kapacita 10 litrů, UN, modrý uzávěr, vodotěsný
Použití:	uchování histologických vzorků po odebrání na chirurgii, po dobu během transportu do patologické laboratoře. Důvod: ochrana personálu chirurgie před formalínem.
Skladování:	pokojeová teplota, uzavřený kontejner, doporučeno 15-25°C
Stabilita:	po otevření ke spotřebě až do expirace (při správných skladovacích podmínkách)
Validita:	1 rok
Varování:	klasifikace: tento produkt smí být používán pouze specializovaným laboratorním technikem a laboratorním personálem. Neaplikujte na živé pacienty. Pročtěte si informace o klasifikaci a riziku substancí uvedených na štítku a etiketě produktu. Vždy vyhledejte bezpečnostní list pro bližší informace ohledně bezpečnostních opatření, první pomoci a postupu při rozliti. Nepoužívejte pokud je kontejner poškozený.
Likvidace:	dle místních nařízení pro likvidaci biologického materiálu



Formalin Dispenser – dávkovač formalínu

Chladicí dávkovací zařízení o kompaktních rozměrech. Slouží k aplikaci roztoku HistoCold chlazeného na 4°C. Zařízení se aktivuje pomocí nožního pedálu.

Instrukce použití:

1. Otevřete kanystr HistoCold (odšroubujte víčko)
2. Našroubujte nasávací hadici dávkovače na kanystr HistoCold.
3. Sešlápněte pedál pro aplikaci chlazeného média.

Rozměry: 325x340mm, výška 1230mm, váha 26kg

Elektrické specifikace: 220-240V, 180W



PATENT PENDING



Chladnička

Chladnička s kapacitou 65l (rozměry 700x440mm, výška 470mm)

Váha 24kg

Regulace teploty +10°C až -20°C

Napájení z baterie 12/24V - 110V/20V / 50-60Hz AC

45W



Transportní vozík

nerezová konstrukce s kolečky

Rozměry 1010mmx550mm, výška 945mm

Váha 11kg

pro více informací a nabídku navštivte www.zena-r.cz, nebo kontaktujte svého obchodního zástupce ZENA-R

Bio - Optica
Improving Pathology

ZENA - R
S.r.o.