

# Bio - Optica

Improving Pathology



## Klessidra 2.0

Již žádné vystavení (karcinogennímu formalínu)

Pracujte bezpečně bez změny postupu rutinní práce

**Nesnižuje vystavení formalínu, zcela jej eliminuje!**

V souladu s nařízením 605/2014 o bezpečné manipulaci



1) Otevřte žluté víčko a vložte biopsii do netoxického pufru



2) Našroubujte předplněnou nádobku formalínu přímo na nádobku pufrém/biopsií. Otočte ventil do pozice O (open)



3) Nakloňte a sledujte jak formalín přeteče do spodní nádoby s biopsií



4) Uzavřete ventil do pozice C (closed). Úspěšně jste vložili biopsii do formalínu bez rizika vystavení jeho karcinogenitě.

05-01V15PKF Klessidra 2.0 – 10ml formaldehyd 12% a 20ml pufr, 27ks v balení

05-01V125PK Klessidra 3.0 – 90ml, 8ks v balení

05-01V250PK Klessidra 3.0 – 160ml, 8ks v balení

**Zažádejte o vzorek  
nebo demonstraci**



[www.bio-optica.it](http://www.bio-optica.it)



**ZENA-R**  
s.r.o.



[www.zena-r.cz](http://www.zena-r.cz)  
[lukas.kordik@zena-r.cz](mailto:lukas.kordik@zena-r.cz)



Scan here to watch the video

**Bio-Optica**